

Číslo modelu: Particle Filtering Half Mask

Počet vrstiev: 1

Norma: EN 149:2001+A1:2009

Dátum výroby: 20201220

Dátum expirácie: 20221219

Produkt: Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu

Použitie materiály: Zloženie: Biela bavlna, netkaná látka, upevňovacie popruhy

Zloženie produktu

Polomaska na filtráciu častíc pozostáva z 5 vrstiev, netkaných textílií, vyfukovaných textílií, 100% ES horúco vzdušnej netkanej textílie, nosného mostíka a gumky na uši

Zloženie	Farba	Suroviny
Vonkajšia vrstva	Biela	PP netkaná textília
Filtračná vrstva	Biela	ES netkaná textília horúcim vzduchom
Filtračná vrstva	Biela	netkaná textília vyfukovaná z taveniny
Filtračná vrstva	Biela	netkaná textília vyfukovaná z taveniny
Vnútoraná vrstva	biela	PP netkaná textília

Inštrukcie pri použití

1. Nedodržanie všetkých pokynov a obmedzení by mohlo vážne znížiť účinnosť tejto polomasky na filtrovanie častíc a viesť k ochoreniu, zraneniu alebo smrti.
2. Pred použitím respirátora na pracovisku musí byť užívateľ školený zamestnávateľom o správnom používaní respirátora v súlade s platnými normami bezpečnosti o ochrane zdravia.
3. Polomaska na filtrovanie častíc neprivádza kyslík. Používajte iba v primerane vetranom priestore. Pri použití máte dostatok priestoru na bežné dýchanie.
4. Ak vám respirátor spôsobuje problémy pri dýchaní alebo sám vám filter upchal nahradte masku novou. Ak sa vám maska poškodí je nutné nahradiť ju novou.
5. Ak dôjde k závratom, podráždeniu alebo k úzkosti, prosím opustite kontaminovanú oblasť.

Obmedzenia používania.

1. Nepoužívajte polomasku na filtráciu častíc a nevstupujte alebo sa nezdržujte v kontaminovanej oblasti za týchto okolností:
 - a) O vzdušie obsahuje menej ako 19,5% kyslíka.
 - b) Ak zacítite alebo ochutnate kontaminant.


- c) Na ochranu pred plynmi alebo parami.
 - d) Ak kontaminanty a ich koncentrácie nie sú známe alebo sú bezprostredne nebezpečné pre život a zdravie.
 - e) Na pieskovanie, striekanie farieb a azbestu.
 - f) v prostredí pod vodou, pri ohni a vo výbušnom prostredí.
2. Masku neupravujte a nepoužívajte ju nesprávne.
 3. Nepoužívajte polomasku na filtrovanie častíc ak nosíte fúzy môžu brániť dobrému utesneniu na tvári.
 4. Polomaska na filtrovanie častíc musí byť skontrolovaná pred každým použitím. Ubezpečte sa že maska nie je roztrhnutá alebo inak poškodená.
 5. Polomaska na filtrovanie častíc pomáha chrániť pred určitými tuhými kontaminantmi. Nevylučuje sa však možné riziko vystavenia sa nákazy alebo infekcie .
 6. Táto polomaska na filtráciu častíc bola označená "NR?", môže byť použitá iba na jednu pracovnú zmenu.

Montážny návod (ako si nasadiť masku)

Vložte prsty do polomasky na filtráciu častíc. Ohnite nosovú sponu prstami, aby ste si vytvarovali tvar nosa.

Držte polomasku na filtráciu častíc v polohe kedy vám zakrýva nos a ústa a potiahnite gumičky ktoré sú po stranách za uši.

Nosovú sponu si upravte oboma rukami aby ste si zabezpečili že maska vám bude dobre tesniť na tvári.

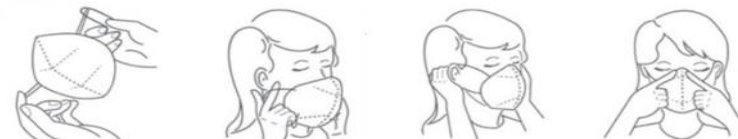

Kontrola zhody

Aby ste otestovali výdychový ventil je nutné si pridržať masku oboma rukami na tvári a zhlboka sa nadýchnuť.

Ak cítite prúdenie vzduchu v oblasti nosa, znova nastavte / dotiahnite nosovú sponu.

Ak pociťujete prúdenie vzduchu okolo okrajov respirátora, premiestnite polohu gumičiek masky, aby ste dosiahli lepšie prispôsobenie.

ak je dýchanie obtiažne alebo ak je maska poškodená či zdeformovaná, okamžite ju vymeňte.

Dôsledné dodržiavanie týchto pokynov je dôležitým krokom v bezpečnom používaní respirátorov.

Dodávateľ: Nový Sanat Holding s.r.o.

Bystrická 1, 966 81 Žarnovica